

ZENTEC

MANUAL DE USO RÁPIDO

NEBULIZADOR A PISTÓN NPZ10



Imagen ilustrativa



**INDUSTRIA
ARGENTINA**


AUTORIZADO POR
anmat



**ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO ES
OBLIGATORIO LEER EL MANUAL DE USO.**

**GARANTÍA
1 AÑO**

01. CONTENIDO DEL PACKAGING

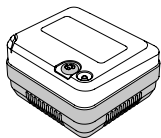

Equipo

Accesorios Kit de Nebulización



Máscara grande



Máscara chica



Pipeta nebulizadora



Codo adaptador



Adaptador bucal





Manguera plástica



Manual de uso rápido

Accesorios Kit de Nebulización: A-NP1 o P62 (No requiere codo adaptador).

1.1 Partes del nebulizador

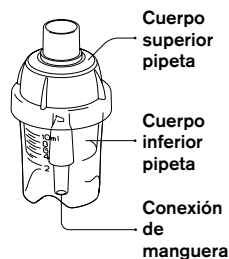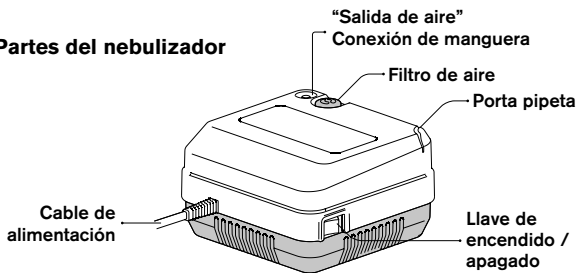


02. CÓMO UTILIZAR EL NEBULIZADOR

⚠ IMPORTANTE

- › Antes de comenzar el proceso de nebulización lavar sus manos.
- › En caso de utilizar el equipo por primera vez, desinfectarlo siguiendo los pasos descritos en el punto 03. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
- › Colocar el equipo en una mesa o superficie plana y estable, cercana a un tomacorriente (a una distancia no mayor a 1.5 metros). No usar el equipo apoyado sobre el piso o sobre la cama.
- › Asegúrese de poder alcanzar los controles y la ficha del cable de alimentación fácilmente estando sentado.
- › Durante el proceso de nebulización la pipeta nebulizadora debe permanecer en posición vertical o levemente inclinada (un ángulo no mayor a 10° con respecto al eje vertical) para no afectar el correcto funcionamiento.

a) Preparación de accesorios

Enhebrar uno de los elásticos en los orificios de la máscara, siguiendo la imagen.

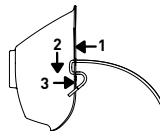


b) Preparación de la medicación

- › Desenroscar la pipeta nebulizadora.
- › Colocar dentro de la pipeta nebulizadora la solución a nebulizar en las proporciones indicadas por su profesional médico*.
- › Enroscar la pipeta nebulizadora.


(*): La indicación de la pipeta nebulizadora está dada en mililitros (ml) y es solo orientativa.

Nota: Este equipo no viene provisto con dosificador.

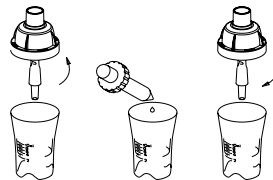

c) Preparación del equipo

- › Conectar el codo adaptador en la pipeta (solo en caso de contar con el kit A-NP1).
- › Conectar una máscara o el adaptador bucal.
- › Conectar la manguera a la pipeta nebulizadora y el otro extremo en el pico de salida de aire.

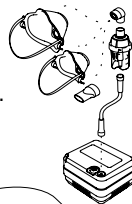


d) Funcionamiento

- › Conectar el nebulizador a la red de energía eléctrica y encender el interruptor para iniciar la nebulización.
- › Realizar el proceso de nebulización según lo indicado por su profesional médico.
- › Terminado el proceso, apagar el equipo y desconectar la unidad de la red de energía eléctrica.
- › Realizar el proceso de limpieza y/o desinfección.

⌚ Modo de funcionamiento: 15 min. encendido-45 min. apagado.

👤 Para más información, leer el manual de uso disponible en la web.

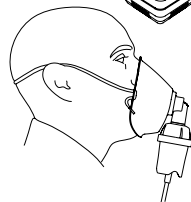


03. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

⚠ IMPORTANTE

- › Antes de proceder a la limpieza, desinfección o mantenimiento, asegurarse de desconectar el equipo de la red de alimentación eléctrica.
- › La pipeta y los accesorios no deben hervirse.
- › No higienizar las máscaras con sustancias tales como hipoclorito de sodio (lavandina), el PVC se oxida con el cloro.
- › Luego de cada uso limpiar el equipo.
- › Desinfectar el equipo después del último tratamiento del día.
- › Desconectar la manguera de la pipeta nebulizadora y del equipo.

a) Preparación

- › Desconectar el codo adaptador de la pipeta (solo en caso de contar con el kit de nebulización A-NP1).
- › Desconectar la máscara (o adaptador bucal) del codo adaptador (solo en caso de contar con el kit de nebulización A-NP1).
- › Desconectar la máscara (o adaptador bucal) de la pipeta nebulizadora (solo en caso de contar con el kit de nebulización P62).
- › Cuidadosamente girar en sentido antihorario la parte superior de la pipeta nebulizadora, sujetando la parte inferior, y separar ambas partes.
- › Descartar el residuo de líquido que quedó sin nebulizar.

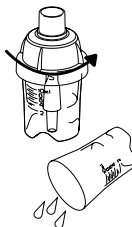

b) Limpieza

Accesorios:

- › Lavar todas las partes, exceptuando el equipo, con agua tibia.
- › Dejar secar al aire libre o secar con toallas de papel limpias.
- › Ensamblar la pipeta nebulizadora, salvo que luego realice la desinfección.

Equipo:

- › Limpiar y secar el exterior del equipo con un paño limpio.

c) Desinfección

Accesorios:

- › Realizar la desinfección tras terminar la limpieza.
- › En un recipiente prepare una solución compuesta por una parte de vinagre y tres partes de agua tibia. Sumergir la pipeta nebulizadora, las máscaras, el adaptador bucal, el codo adaptador y la manguera de conexión, durante 10 minutos.
- › Lavar la pipeta nebulizadora, la máscara, el adaptador bucal, el codo adaptador y la manguera de conexión con agua tibia.

- › Dejar secar al aire libre o secar con toallas de papel limpias.
- › Ensamblar la pipeta nebulizadora.

Equipo:

- › Desinfectar el exterior del equipo con un paño limpio embebido en alcohol etílico al 70%, luego secar.

04. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- › No utilizar el nebulizador sin prescripción médica o para otro fin que no sea el indicado en el manual de uso.
- › No utilizar convertidores de tensión, ni cables prolongadores.
- › No dejar el equipo solo, al alcance de los niños o desatendido mientras se encuentra encendido.
- › No utilizar el nebulizador con o en presencia de mezclas anestésicas inflamables.
- › Nunca bloquear los orificios de salida y/o filtro de aire.
- › Utilizar únicamente una red de alimentación de 220V ~ 50Hz.
- › Los accesorios del nebulizador deben ser de uso individual.

ATENCIÓN

Leer todas las advertencias de seguridad y contraindicaciones del manual de uso disponible en la web.

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso.

Nebulizador a Pistón Modelo NP10, Marca ZENTEC

Producto autorizado por la ANMAT PM-97-01

Director Técnico: Bioing. Diego Fontana. Matricula COPITEC 5611

Uso sin prescripción

 **SILVESTRIN FABRIS S.R.L. INDUSTRIA ARGENTINA**

9 Av. Del Barco Centenera 3481 (C1437ACG) C.A.B.A. Argentina.

AG-MURNPZ10 v02 | Última revisión noviembre 2024

Comuníquese con nosotros:

Por consultas, reclamos o por problemas técnicos,
Servicios Técnicos Oficiales:

TEL.: (54-11) 5254-5655